



Gebrauchsinformation!
Bitte aufmerksam lesen!



Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Creme NEUTRAL

ohne Farb- und Geschmacksstoffe

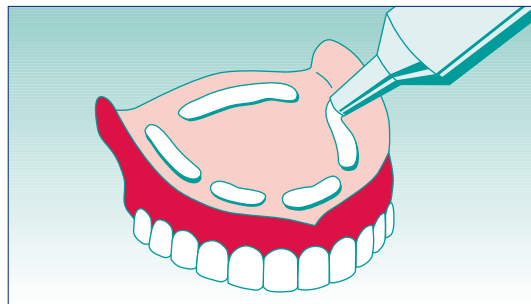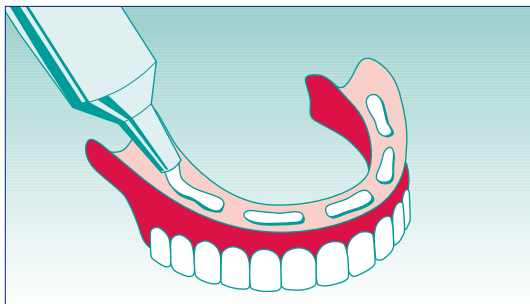

Anwendung

Haft-Creme zum Auftragen auf Zahnprothesen.

Dosierung und Art der Anwendung

Prothese und Mundschleimhaut von Rückständen reinigen und **Protefix® Haft-Creme NEUTRAL** in Abständen dünn auf die nasse Prothese auftragen (in die Vertiefung der Ober- oder Unterkieferprothese, die dem Kiefer später aufliegt). Bei Bedarf können Sie auch den hinteren Teil der Gaumenplatte an der Oberkieferprothese mit einem Streifen **Protefix® Haft-Creme NEUTRAL** versehen. Setzen Sie die Zahnprothese dann ein und drücken Sie sie einige Sekunden lang fest an den Kiefer.

Nur auf die gesunde Mundschleimhaut auftragen! Warten Sie ca. 5 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Dosieren Sie die **Protefix® Haft-Creme NEUTRAL** sparsam, da bei einer Überdosierung die Haftung Ihrer Prothese beeinträchtigt werden kann.

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen sind Überempfindlichkeitsreaktionen an der Mundschleimhaut oder auch des Gesamtorganismus nicht auszuschließen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Arzt auf.

Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, da das Eindringen von Flüssigkeit zur Verhärtung der Haft-Creme führen kann.
- Haftmittelrückstände lassen sich leicht mit einem speiseölgetränkten Wattebausch entfernen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

Zusammensetzung:

Protefix® Haft-Creme NEUTRAL enthält:

Gemisch der Natrium-/Calciumsalze des Copolymers aus Methyl-Vinyl-Ether und Maleinsäure-anhydrid, Carboxymethylcellulose, Paraffin, Vaseline, Siliciumdioxid.


Queisser
PHARMA



D-24914 Flensburg
www.queisser.de



Sicherheit für die Dritten. Protefix®

Protefix® Haft-Creme NEUTRAL ohne Farb- und Geschmacksstoffe

Ein sicheres, natürliches Tragegefühl der Dritten – ohne geschmacksbeeinflussende Faktoren des Haftmittels wie Farb- oder Aromastoffe – wird von vielen Prothesenträgern gewünscht. Die **Protefix®** Forschung hat diesem Wunsch entsprochen und **Protefix®** Haft-Creme **NEUTRAL** entwickelt. Sie ist frei von Farb- und Geschmacksstoffen, geruchs- und geschmacksneutral. Unangenehme Aroma-Veränderungen von Speisen oder Getränken werden so vermieden. Allergischen Reaktionen, die bei der Verwendung von Farb- und Geschmacksstoffen auftreten können, wird vorgebeugt. **Protefix®** Haft-Creme **NEUTRAL** sorgt für ein natürliches, sicheres

Tragegefühl der Dritten, selbst bei schwierigen Haft-Problemen. Dank ihrer Nass-Haftkraft kann sie problemlos auf die feuchte Prothese aufgetragen werden. Sie wirkt sofort und langanhaltend und gibt Sicherheit und Selbstvertrauen den ganzen Tag.



Bei Fragen, Problemen oder Anregungen zum Thema Haftmittel schreiben Sie an **Queisser Pharma, Protefix®** Beratungsteam, D-24914 Flensburg. Oder im Internet unter www.protefix.de.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wie haben Sie **Protefix®** kennengelernt?

- Apotheker Bekannte
 Zahnarzt Werbung

Warum verwenden Sie Haft-Creme?

- bei mir hält nichts anderes
 weil die Prothese sicher und lange haftet
 weil ich die Haft-Creme direkt auf die nasse Prothese auftragen kann

Protefix® Haft-Creme **NEUTRAL** ohne Farb- und Geschmacksstoffe

- finde ich gut finde ich nicht gut, weil

Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?

- Ja, und zwar _____
 Nein

Ich bin _____ Jahre alt und
verwende **Protefix®** Produkte seit _____ Jahren.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Information erhoben, verwendet und genutzt werden. Die Weitergabe an Dritte mit Ausnahme von Tochtergesellschaften von Queisser Pharma ist ausgeschlossen.

Datum / Unterschrift _____

Bitte senden Sie diesen Abschnitt an: Queisser Pharma, D-24914 Flensburg. Wir nutzen Ihre Angaben streng **vertraulich** zur ständigen Produkt-Verbesserung. Bei Anfragen Ihrerseits setzen wir uns gerne mit Ihnen in Verbindung. Wenn Ihnen die telefonische Beantwortung recht ist, geben Sie bitte Ihre Telefonnummer an.

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Telefon _____

